


SARL CANNES FAYET SE
2 ZA de Bournat
63190 ORLEAT- France
+33(0)4 73 73 20 40


LA BONNE POSITION DE VOTRE CANNE / THE CORRECT POSITION OF YOUR WALKING STICK

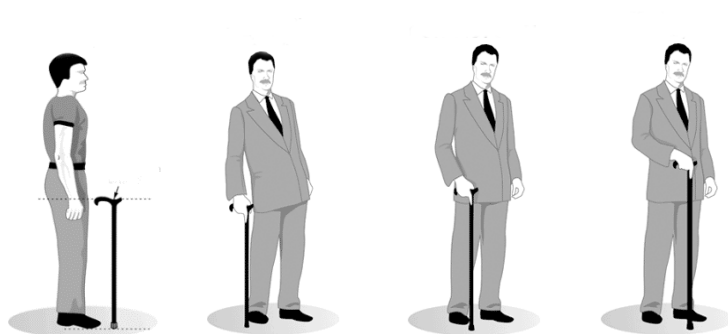

*La paume de la main doit être située au niveau de l'aine.

* the palm of your hand must be situated on a level of your groin.

© Walking Equipment Co.

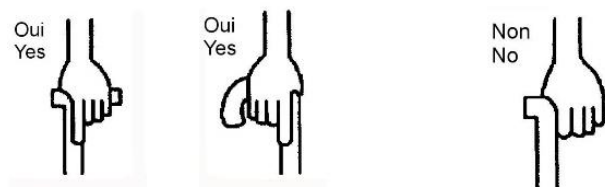

Vérifier la bonne mesure de votre canne. Si la canne n'est pas à la bonne taille, demandez l'avis d'un professionnel, la faire régler ou couper si nécessaire

Vérifier le bon état de l'embout.

La canne est prête à l'emploi.

Check the correct size of your cane. If the cane is not the right size, ask a professional for advice, have it adjusted or cut if necessary.

Check the tip for proper condition.

The cane is ready for use

NB- vérifiez régulièrement que tous les embouts caoutchouc soient en bonne condition.

Pour votre sécurité, n'utilisez JAMAIS la canne sans embout.

NB- Check regularly that all rubber end caps are in good condition.

For your safety, NEVER use the cane without a tip.

Les cannes sont étudiées pour une utilisation dites « normale » de canne d'aide à la marche.

The canes are designed for a so-called "normal" use as walking sticks.

NOTICE UTILISATION DES CANNES :

CANNES PLIANTES & REGLABLES

Cannes Pliantes : Après avoir sorti la canne de sa housse

Retirer la bague noire qui maintient la canne pliée.

La canne se déplie

Pour régler la hauteur de la canne pliante &/ou seulement réglable :

- Dévisser d'un tour la bague se trouvant sur le premier élément
- Appuyer sur le petit ergot doré
- Régler la hauteur désirée, l'ergot doit être positionné dans l'un des trous de réglage
- Revisser la bague

Cannes Pliantes : Pour replier la canne, tirer sur chacun des éléments, replier la canne.

FOLDING & ADJUSTABLE CANES

Folding canes: After taking out the cane from its cover

Remove the black ring that holds the cane folded.

The cane unfolds

To adjust the height of the folding cane & /or only adjustable:

- Unscrew the ring on the first element
- Press the little golden pin
- Adjust the desired height, the pin must be positioned in one of the adjustment holes
- Rescrew the ring

Folding canes: To fold the cane, pull on each of the elements, fold the cane.

MODE D'EMPLOI CANNE TELESCOPIQUE

- Prenez un tube dans chaque main,
- Tourner le tube inférieur d'un demi-tour maximum à gauche,
- Le faire coulisser pour régler la hauteur
- Re-bloquer, en tournant en sens inverse.

Faites un contrôle avant utilisation

Ne surtout pas dévisser la bague !

TELESCOPIC ADJUSTABLE CANE

- Take a tube in each hand,
- Turn the bottom tube to the left for up to half a turn,
- Slide to adjust height
- Re-block.

Check before use

Do not unscrew the ring!

